



## Автоклав Vacuklav 24 B/L+

Производитель: Melag

Модель: Vacuklav 24 B/L+

<https://assa-group.ru/vacuklav-24-b-l-plus>

Vacuklav 24 B/L+ относится к автоклавам класса "B" в соответствии с европейским стандартом EN 13060 и, следовательно, абсолютно надежен.

Vacuklav 24 B/L+ - замечательный автоклав с внутренней камерой глубиной 60 см. Vacuklav 24 B/L+ имеет особенно глубокую стерилизационную камеру (60 см, объем 29 литров), и поэтому особо пригоден для врачебных кабинетов и больниц, где необходима быстрая стерилизация очень длинных инструментов. Техническая конструкция аналогична Vacuklav 24 B+.

Специальными преимуществами являются высокая эффективность работы, вакуумный насос с водяным охлаждением, повышенная надежность, простота использования и множество возможностей для документирования.

Vacuklav 24 B/L+ работает по принципу фракционированного предварительного вакуума. Это происходит так: вначале воздух из камеры откачивается чрезвычайно мощным вакуум-насосом. Затем несколько раз впускают водяной пар, который тут же снова откачивается. В результате к началу стерилизации в котле или в упакованном полом инструменте, либо в текстильных изделиях не

остается воздуха, отрицательно сказывающегося на качестве стерилизации.

Для эффективной сушки, являющейся предварительным условием длительного хранения стерилизованного материала в упаковке, VacuKlav создает вакуум в конце процедуры. Датчики и современные микропроцессорные средства контроля регулируют и контролируют параметры давления и температуры, необходимые для надежной стерилизации.

Vacuclav 24 B/L+ предлагает <b>5 программ</b>	а также <b>2 контрольные программы</b>
Универсальная программа 134°C/ 2 бар	вакуум-тест
Быстрая программа "B" 134°C/ 2 бар	тест Боуи-Дика
Быстрая программа "S" 134°C/ 2 бар	тест Боуи-Дика
Антиприонная программа 134°C/ 2 бар	
Мягкая программа 121°C/ 1 бар	

- Для большего удобства в эксплуатации VacuKlav 24 B/L+ можно подключить к системе водоподготовки MELAdem 40 или MELAdem 47 Часть водопроводной воды обрабатывается и используется для получения пара, другая часть используется для охлаждения вакуум-насоса. Подача деминерализованной воды и слив использованной воды производятся автоматически.
- Документирование циклов стерилизации, требуемое законодательством выполняется через встроенный

последовательный интерфейс (RS 232), для подсоединения к принтеру MELAprint 42 или ПК клиники. Для этого потребуется программное обеспечение MELAwin , разработанное MELAG.

- Дополнительно можно подключить MELAflash CF Card Printer, используемый для сохранения протоколов стерилизации на картах MELAflash CF Card. Протоколы стерилизации можно читать на любом компьютере с помощью MELAflash CF-Card reader.
- Контроль партий загрузки можно очень легко проводить с помощью теста на Helix с помощью специализированного устройства MELAcontrol. Документация на выдачу инструмента оформляется системой MELAdoc label printer, позволяющей печатать листы документации и этикетки для стерилизационных упаковок.
- Автоклавы Vasuklav поставляются с держателями для лотков или кассет, входящими в стоимость автоклава. Комбинированный держатель С (для 6 лотков или для 3 стандартных кассет) поставляется в качестве стандартного варианта. Также можно заказать различные стерилизационные контейнеры.

## Технические характеристики

### Габариты

Наружные размеры:	ширина: 42,5см x глубина: 75см x высота: 48,5см
Камера:	ø 25 x 60 см
Емкость:	29 литров

Лоток: ширина: 19см,  
глубина: 55 см, высота:  
2см,

### Электропитание:

230 В / 50 Гц / 2,400 Вт

### Продолжительность циклов программы:

Программа :	Время стер илизации:	Время цикла (горячий старт):	Время сушки:
Универсаль ная программа (134°C / 2 бар)	5 минут	около 35 минут	15 минут
Ускоренная программа „В“ (134°C / 2 бар)	3,5 минуты	около 28 минут	10 минут
Ускоренная программа „S“ (134°C / 2 бар)	3,5 минуты	около 20 ми нуты	10 минут
Щадящая программа (121°C / 1 бар)	20 минут	около 45 минут	20 минут

Антиприонн ая программа  
(134°C / 2 бар)      20 минут      около 50 минут      15 минут

Тест Боуи-Дика  
(134°C / 2 бар)      3,5 минуты      около 23 минут

<https://assa-group.ru/vacuklav-24-b-l-plus>

**Подберем  
оборудование  
конкретно под вашу  
задачу**

**+ 7 495 215-06-01**

Позвоните, мы составим для вас  
коммерческое предложение и  
проконсультируем в юридических  
вопросах.