



## Автоклав Euroklav 23 VS+

Производитель: Melag

Модель: Euroklav 23 VS+

<https://assa-group.ru/euroklav-23-vs-plus>

Автоклавами серии Euroklav MELAG предлагает ещё более экономически выгодную альтернативу автоклавам серии Vacuklav. Автоклавы серии Euroklav – полностью отвечают строгим требованиям, предъявляемым к автоклавам «класса S», в соответствии с European Standard EN 13060, и предназначены для использования в медицинской практике там, где стерилизация инструментов не требует наличия автоклавов «класса B». Автоклавы MELAG серии Euroklav – это высокотехнологичные изделия, качество которых подтверждено испытаниями в независимой аккредитованной лаборатории. Таким образом, Euroklav 23 VS+ может использоваться для стерилизации упакованных инструментов, имеющих простые полости «типа B» (в соответствии с определением, данным в EN 13060) и небольшого количества текстильного материала в упаковке.

Euroklav 23 VS+ снабжён эффективной вакуумной помпой, которая создаёт вакуум на начальном этапе процесса стерилизации с целью обеспечения более качественного удаления воздуха из рабочей камеры, а также для создания пост-вакуума для достижения оптимального результата сушки, что особенно важно для предметов в упаковке.

- Euroklav 23 VS+ был разработан как «стоящее отдельно» устройство и требует для работы только подключения к электричеству. Без каких-либо дополнительных манипуляций этот автоклав может использовать встроенный резервуар для деминерализованной воды и отдельно резервуар для отработанной воды. Для более удобной работы Euroklav 23 VS+ может быть подключен к устройству водоподготовки MELAdem 40 или MELAdem 47 и к сливной системе. В этом случае питание деминерализованной водой и слив будут происходить автоматически.
- Необходимое документирование стерилизационных циклов может осуществляться через встроенный серийный порт при подключении принтера MELAprint 42 или персонального компьютера. На компьютер, в этом случае, потребуется установить специальное программное обеспечение MELAwin , разработанное MELAG.
- Кроме того, существует возможность записи информации на MELAflash CF Card Printer, с последующим хранением на MELAflash CF Card. Эти записи можно будет считать на любом персональном компьютере с помощью MELAflash CF-Card Reader.
- При хранении стерильных упаковок удобно использовать систему MELAdoc , состоящую из информационных листков и маркировочного пистолета.
- Для оптимального использования объёма рабочей камеры вы можете выбрать одну из трёх подставок: например, подставка С на 5 лотков или 3 standard tray cassettes является стандартной. Кроме того, предлагаются различные sterilization containers.

## **Технические характеристики**

### **Габариты**

Наружные размеры:	ширина: 42,5см x глубина: 66см x высота: 48,5см
Камера:	∅ 25 x 45 см
Емкость:	22 литра
Лоток:	ширина: 19см, глубина: 42 см, высота: 2см
Вес:	43 кг

### **Электропитание:**

230 В / 50 Гц / 2,300 Вт

### **Продолжительность циклов программы:**

<b>Программа :</b>	<b>Время стер илизации:</b>	<b>Время цикла (горячий старт):</b>	<b>Время сушки:</b>
Универсаль ная программа (134°C / 2 бар)	5 минут	около 25 минут	примерно 22 минуты
Быстрая программа (134°C / 2 бар)	3,5 минуты	около 14 ми нут	примерно 12 минут
Мягкая прог	20 минут	около 33	примерно

рамма (121°C / 1 бар)		минут	26 минут
Антиприонн ая программа (134°C / 2 бар)	20 минут	около 40 минут	примерно 23 минут
Тест Боуи- Дика (134°C / 2 бар)	3,5 минуты	около 23 минут	примерно 20 минут

<https://assa-group.ru/euroklav-23-vs-plus>

**Подберем  
оборудование  
конкретно под вашу  
задачу**

**+ 7 495 215-06-01**

Позвоните, мы составим для вас  
коммерческое предложение и  
проконсультируем в юридических  
вопросах.