



Полуавтоматический 4-канальный коагулометр Coadata 4001

Производитель: **Helena Biosciences Europe**

Модель: Coadata 4001

<https://assa-group.ru/coadata-4001>

Анализатор «CoaDATA 4001» - оптико-механический, в его основе лежит турбодиметрический метод измерения. Коагулометр имеет память, сохраняющую параметры для 15 методик, включая калибровочные кривые, позволяет вводить с клавиатуры необходимые для измерений данные и распечатывать на встроенном термопринтере готовые результаты.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Турбодиметрическое измерение дает сравнимые показатели для полностью автоматических коагулометров
- Точное обнаружение сгустка
- Измерения в иктеричных и липемических образцах плазмы
- Термостатируемые ячейки для хранения реагентов на борту анализатора
- Наличие на борту анализатора позиции

с перемешиванием реагента

- Длительная стабильность реагентов и тест-систем
после приготовления
- Автозапуск реакции для удобства и точности тест-системы
- Кюветы с предварительно вложенной магнитной мешалкой
- Низкие коэффициенты вариации при использовании
комбинации инструмента и реагента компании производителя
- Совместимость с комплексной панелью
для коагуляционных испытаний
- Использование микрообъемов реагентов

Принцип измерения

Турбодиметрия; Оптико -
механический с автоматической
установкой нуля и магнитной
мешалкой для гомогенизации
тестов и увеличения
чувствительности.

Полностью открытая система

Ограничения - только для
проведения традиционных,
клаттинговых
коагулометрических тестов (не
хромогенных)

Перечень выполняемых тестов

Соответствие. Возможность
программирования всех тестов
• Фибриноген по Клауссу

- Факторы V, VII, VIII, IX, X, XI, XII
- APC резистентность
- Тромбиновое время
- Протромбиновое время (% активности по Квику, МНО)
- Расчетный фибриноген (Dfib), определяется

одновременно с
протромбиновым временем

- Активированное частичное тромбопластиновое время
- Волчаночный антикоагулянт скрининг, подтверждение
- Протеин S (клоттинговый метод)

4

Количество измерительных каналов, не менее
Пропускная способность

- 40 тестов /час ПВ

Количество различных методик на борту

- 15 тестов/час АЧТВ
- 15

Встроенное устройство для работы с картой памяти
Характеристики образца

Наличие. Уникальная опция

Иктеричные и липэмические образцы

Механизм перемешивания

Металлические мешалки (одна позиция перемешивания)

Инкубируемые ячейки	реагентов)
Ячейки для реагентов	Не менее 16 для образцов
Ячейки для калибровки	Не менее 4
температуры	1
https://assa-group.ru/coadata-4001	

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.