



Инкубатор для новорожденных Atom Incu i

Производитель: Atom Medical Corporation

Модель: Incu i

https://assa-group.ru/index.php?route=product/product&product_id=4265

Инкубатор Атом Инку Ай (Atom Incu i) - Инкубатор интенсивной терапии для выхаживания новорожденных с экстремально низкой массой тела. Широкий набор технических функций позволяет контролировать температуру и влажность внутренней среды, осуществлять сервоконтроль концентрации кислорода внутри купола по температуре тела младенца, проводить манипуляции с новорожденным в оптимальных условиях

Управление инкубатором

Атом Инку Ай (Atom Incu i) осуществляется с помощью удобного съемного внешнего цветного TFT-ЖК дисплея. Сенсорный монитор может быть зафиксирован с левой или с правой стороны основного блока инкубатора. Интуитивно понятные элементы управления помогут быстро задавать необходимые параметры. Наглядный дисплей четко отображает все доступные параметры в режиме реального времени, позволяя постоянно контролировать состояние пациента и условия внутри инкубатора.

Сохранение оптимальной температуры в инкубаторе

Для минимизации тепловпотерь внутри инкубатора и сохранения комфортной температуры тела младенца, специальная система циркуляции обеспечивает равномерное движение потока теплого воздуха.

Когда порты доступа открыты для манипуляций с телом новорожденного, циркулирующий воздух создает тепловую завесу для сохранения оптимальных условий внутри купола.

Изменение наклона матраса

Матрас в инкубаторе Атом Инку Ай (Atom Incu i) размещен на регулируемой основе, наклон которой плавно изменяется до 13 градусов. Управление механизмом наклона осуществляется специальными рычагами, расположенными снаружи модуля по обеим его сторонам. Система может работать как при закрытом, так и при открытом куполе. Во втором случае основу вместе с матрасом можно выдвигать в правую или левую стороны. Специальные ограждения исключают возможность выпадения ребенка.

Сервоконтроль влажности в неонатальном инкубаторе для новорожденных

Система сервоконтроля влажности, которой оснащен неонатальный инкубатор Атом Инку -ай (Atom Incu i), позволяет быстро устанавливать и оперативно менять влажность внутренней микросреды.

Встроенные датчики фиксируют влажность внутри инкубатора, оповещают о низком уровне воды в резервуаре. Этот резервуар и блок с бойлером могут быть легко извлечены для чистки и дезинфекции.

В соответствии с рекомендациями производителя Атом Медикал

(Atom Medical), для дополнительной очистки и дезинфекции воды необходимо использовать специальную таблетку-вкладыш, покрытую серебряным напылением.

Лоток для фиксации рентгеновской кассеты

Рентген-кассета в инкубаторе Атом Инку Ай (Atom Incu i) фиксируется с правой и левой стороны основного модуля. Это позволяет делать снимки не открывая купол и не меняя настроек инкубатора. Нет необходимости беспокоить ребенка.

Стойки (тележки) в двух вариантах

Для использования в различных условиях предлагается два варианта шасси: - стойка с фиксированной высотой для перемещений внутри здания; - тележка с функцией электрической регулировки высоты при помощи педалей.

- съемный многофункциональный монитор управления
- система циркуляции воздуха с регулировкой его температуры
- расположение лотка для рентген кассеты позволяет делать снимки, не открывая инкубатор
- положение матраца можно плавно менять, не открывая инкубатор
- стойки с возможностью изменения высоты с помощью удобных педалей
- бесшумно закрывающиеся ящики и дверцы

https://assa-group.ru/index.php?route=product/product&product_id=4265

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.