



## Паровой автоклав Cliniklav 25

Производитель: Melag

Модель: Cliniklav 25

<https://assa-group.ru/cliniklav-25>

Cliniklav 25 - надежный и высокопроизводительный автоклав для больших клиник и больниц.

Самыми важными требованиями, предъявляемыми к стерилизаторам в частных медицинских кабинетах, где проводятся операции, являются удобство пользования, короткие циклы стерилизации и низкое потребление энергии в сочетании с большой надежностью.

Cliniklav 25 сочетает в себе очень большое внутреннее пространство с невероятно компактными наружными размерами и поставляется и как настольное устройство, и в практичном напольном исполнении.

Использование качественного автоклава означает надежное планирование бесперебойного графика операций и позволяет избежать задержек в работе. Cliniklav 25 доказал свою надежность на протяжении многих лет в сотнях медицинских кабинетов и больниц по всему миру.

Cliniklav 25 работает с фракционным предварительным вакуумированием, соответствуя стандарту EN 285, и, подлежит

валидации. Можно стерилизовать до 15 кг упакованного или неупакованного инструмента, а также до 7 кг текстильных изделий или других пористых материалов. При использовании в стоматологической практике и хирургической стоматологии Cliniklav 25 предлагает оптимальное пространство примерно для 36 стандартных поддонов или 18 кассет. При небольшой загрузке две быстрые программы обеспечивают наиболее короткие циклы работы от 14 минут, включая предварительное вакуумирование.

Для достижения наивысшего качества в хирургии был специально создан Cliniklav 25, который может успешно применяться не только в различных областях хирургии, но также и в других отделениях лечебных учреждений, в том числе амбулаторных. Cliniklav 25 удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к «малым» стерилизаторам. Потребление электроэнергии и воды было существенно снижено, а время рабочего цикла сокращено благодаря применению современных технологий. Полное время рабочего цикла для «Быстрой программы», используемой для стерилизации неупакованных инструментов, занимает всего 14 минут, включая этап предварительного фракционированного вакуума. Для упакованных инструментов или «мягкого» материала норма загрузки составляет соответственно 15кг и 7кг за один рабочий цикл, что вполне обеспечивает потребности небольшой клиники

## **Надёжность**

Важность наличия высококачественного автоклава в хирургическом отделении становится особенно очевидной, когда вам приходится откладывать операцию, из-за того, что вдруг обнаруживается отсутствие стерильных инструментов или принадлежностей и т.п. Многие тысячи часов испытаний в лаборатории и практическая работа в медицинских учреждениях гарантирует вам максимальный уровень качества и функциональной надёжности Cliniklav 25. Многолетнее тесное сотрудничество с всемирно известными производителями

комплектующих, лидерами в своей области, является неотъемлемой частью успешной корпоративной философии.

## **Быстрота**

С самого начала разработки Cliniklav 25, Melag уделял большое внимание не только экономичности потребления энергии и воды, но также и сокращению времени прохождения рабочей программы. Кроме сокращения стоимости одного рабочего цикла, это позволяет сократить общее количество инструментов в клинике. Другими словами, инструменты и материалы становятся вновь доступными очень быстро: при использовании «Универсальной программы» 15 кг инструментов снова готовы к использованию не более чем через 56 минут (включая высокоэффективную вакуумную сушку). При использовании «Быстрой программы», всего через 14 минут.

## **Удобство пользования**

Разнообразие программ не должно становиться самоцелью. Большое количество управляющих элементов и сложное меню, возможно, внешне выглядит впечатляюще, но обходится дорого, когда приводит к ошибкам в управлении, прерыванию программы или перезагрузке. Всё это стоит времени и денег. Вот почему мы сократили элементы управления в Cliniklav 25 до нескольких кнопок, что позволяет удобно управлять самыми необходимыми функциями. Кнопка «Программа» позволяет выбрать одну из четырёх рабочих программ, тест "Боуи и Дика" и вакуумный тест. Кнопка «Старт/Стоп» запускает эти функции. По вашему желанию, MELAG может добавить для вас в Cliniklav 25 индивидуальные программы.

## **Встроенное документирование**

Необходимое документирование стерилизационных циклов может осуществляться через встроенный серийный порт при

подключении принтера MELAprint 42 или персонального компьютера. На компьютер, в этом случае, потребуется установить специальное программное обеспечение MELAwin, разработанное MELAG. Кроме того, в Cliniklav 25 существует возможность записи информации на MELAflash CF Card Printer, с последующим хранением на MELAflash CF Card. Эти записи можно будет считать на любом персональном компьютере с помощью MELAflash CF-Card Reader. Контроль качества стерилизации удобно и легко осуществлять посредством специального приспособления для проведения «Геликс-теста» и MELAcontrol. При хранении стерильных упаковок удобно использовать систему MELAdoc, состоящую из информационных листков и маркировочного пистолета MELAdoc label printer. Для оптимального использования объёма рабочей камеры MELAG предлагает держатели на 4 лотка или 2 корзины. Кроме того возможна комплектация различными стерилизационными контейнерами. Возможно также использование одного большого контейнера размером 30 x 30 x 60 см.

## Технические характеристики

### Габариты

Cliniklav 25 (Настольная модель):	Ширина: 61.6 см x Глубина: 84 см x Высота: 80 см
Вес Cliniklav 25	157 кг
Рабочая камера:	Ширина: 32 см x Глубина 65 см x Высота: 32 см
Нижний шкаф	Ширина: 61.6 см x Глубина: 84 см x Высота: 80 см
с нижнего шкафа	40 кг

## Электропитание:

3 N AC 400V / 50-60Hz / 10 KW

## Продолжительность циклов программы:

Программа:	Время стерилизации:	Время цикла (тёплый старт):	Время сушки:
Универсальная программа (134°C / 2 бар)	5 минут	примерно 33 минуты	20 минут
Быстрая программа (134°C / 2 бар)	3,5 минуты	примерно 16 минут	15 минут
Мягкая программа (121°C / 1 бар)	20 минут	примерно 32 минут	20 минут
Антиприонная программа (134°C / 2 бар)	20 минут	примерно 50 минут	20 минут
Тест Боуи-Дика (134°C / 2 бар)	3,5 минуты	примерно 48 минут	10 минут
Вакуум-тест	-	примерно 18 минут	-

<https://assa-group.ru/cliniklav-25>

**Подберем  
оборудование  
конкретно под вашу  
задачу**

**+ 7 495 215-06-01**

Позвоните, мы составим для вас  
коммерческое предложение и  
проконсультируем в юридических  
вопросах.