



Установка для термической дезинфекции медицинских отходов **MediSter 160**

Производитель: **Meteka**

Модель: MediSter 160

<https://assa-group.ru/medister-160>

Стационарная установка Medister 160 производительностью до 60 л/час (до 26 кг/час) для дезинфекции медицинских отходов класса Б и В в стационарах и лабораториях различного профиля

- Производительность до 60л/час (до 20 кг/час)
- Дезинфекция осуществляется на основе технологии СВЧ-излучения.

100% гарантия дезинфекции

Генерация СВЧ излучения из трех источников, вращение контейнера на поворотной платформе, а также автоматическое увлажнение отходов вначале цикла обеспечивают их равномерный нагрев до необходимой температуры 100°C.

Контроль температуры осуществляется с помощью двух независимых температурных датчиков РТ100. Если в процессе цикла температура не достигла 100°C, на этикетках будет распечатано уведомление о не прошедшей дезинфекции.

Безопасность использования

Корпус установки надежно изолирован и исключает проникновение СВЧ излучения наружу.

Цикл дезинфекции полностью автоматизирован, дверь установки блокируется на все время работы.

Автоматическое увлажнение сухих отходов и их равномерный нагрев исключает избыточное разогревание отдельных областей и риск воспламенения

Удобство работы

- Полный микропроцессорный контроль
- Русскоязычное меню
- Сенсорный жидкокристаллический цветной дисплей отображает всю необходимую информацию о цикле дезинфекции: температурный режим, время экспозиции, вес отходов, а также статистические данные о ранее проведенных циклах.
- Встроенный принтер распечатывает информацию о цикле на русском языке на специальных наклейках, одна из которых помещается на пакет с медицинскими отходами, прошедшими обработку, а другая сохраняется в журнале регистрации.
- USB-порт обеспечивает возможность подключения к компьютеру для последующего хранения и обработки данных.
- Система доступа к меню разными пользователями при введении пароля.

Технические характеристики

?????????? ???? ?????	60 ?
?????? ?????????????????? ???? ?	45 ???

?????? (?????/??????/??????)	1160 ? 732 ? 1670 ??
???	350 ??
?????????????? ?????????	380 ?, 50 ??
????????	6,5 ???
????????????????	3,5 ???/ ???
???????? ??-????????	2450 ??? +/- 50 ???

Инсталляция

Требования к помещению:

- Отдельное помещение, отапливаемое и легко проветриваемое
- Минимальный размер помещения 6 м2

Подключения:

- электричество
- вода
- канализация / емкость для слива конденсата
- вытяжная вентиляция (рекомендовано)

<https://assa-group.ru/medister-160>

**Подберем
оборудование
конкретно под вашу
задачу**

+ 7 495 215-06-01

Позвоните, мы составим для вас
коммерческое предложение и
проконсультируем в юридических
вопросах.



+7 499 490-02-72
zaproso@assa-group.ru

634021, г. Томск, ул. Елизаровых
53/2, оф. 804
www.assa-group.ru